



# Ficha Técnica do Produto

Ref. IC-12-K

Máscara Cirúrgica Tipo IIR com Elásticos



ICEMEDICS®

## Informações Técnicas:

### Modelo do Fabricante: LHKL-B-1

Máscara Cirúrgica Tipo IIR, fabricada com três camadas de tecido não tecido e material filtrante, com tira nasal moldável em Aço+PP e dois elásticos de ajuste suaves.

1ª CAMADA	2ª CAMADA	3ª CAMADA
Tecido Não Tecido 25g	Melt-Blown 25g	Tecido Não Tecido 20g

Clipe Nasal: 11 cm

Elásticos de Ajuste: 17,5 cm

Dimensões da máscara: 17,5 x 9,5 cm

Cor: AZUL

Máscara e elásticos livres de látex, grafeno e fibra de vidro, não causam irritações.

## Normativas e Uso:

Produto Conforme ao Regulamento **UE 2017/745** relativo aos **produtos médicos - Classe I** Produto Fabricado sob os padrões da Norma **ISO 13485:2003+AC2007**.

A Máscara atende às exigências da norma **EN 14683:2019+AC2019**

Ensaio N°: GOLMOXKC355595L1

Laboratório Acreditado pelo CNAS N°: L0412

Eficiência de Filtragem Bacteriana	Respirabilidade/Pressão Diferencial	Limpeza Microbiana/Carga Biológica	Pressão de Resistência a Respingo
$\geq 98\%$	$< 60\%$	$\leq 30$ UF/g	$\geq 16$

## Instruções de Uso:

Verifique o estado da máscara e a validade antes de usá-la.

Não utilize a máscara por mais de 4 horas

Lave as mãos antes de usar a máscara e toque apenas nos elásticos

Coloque a máscara sobre o nariz/boca e passe os elásticos atrás das orelhas.

Ajuste adequadamente a tira nasal e a área do queixo.

Evite tocar ou manipular a máscara durante o uso.

## Informações Logísticas:

Etiquetagem Conforme a Norma 14683:2019+AC:2019 e Produto Médico Classe I.

Apresentação:

- Bolsa Dispensadora: 10 unidades
- Embalagem Master: 2.500 unidades (250 bolsinhas)
- Euro Paletes com 30 Caixas

Cód EAN: 9 6974100420492- Fabricado na China

UDI-DI Básico: 6974100423599AVC

Armazenar em local seco, limpo e temperaturas entre 5° e 35°. Evitar exposição direta à luz solar