



Ficha Técnica do Produto

Ref. IC-12C-B

Máscara Cirúrgica Tipo IIR com Fitas



Informação Técnica:

Modelo do Fabricante: LHKL-TB-1

Máscara Cirúrgica Tipo IIR, fabricada em três camadas de tecido não tecido e material filtrante, com tira nasal moldável em aço+PP e quatro fitas de ajuste.

1ª CAMADA	2ª CAMADA	3ª CAMADA
Tecido Não Tecido 25g	Melt-Blown 25g	Tecido Não Tecido 20g

Clipe Nasal: 11 cm

Tiras de Ajuste: 41 cm

Dimensões da Máscara: 17,5 x 9,5 cm

Cor: AZUL

Máscara e Elásticos livres de Látex, Grafeno e Fibra de Vidro, não causa irritações.

Normas e Uso:

Produto conforme ao Regulamento **UE 2017/745** referente a **produtos de uso médico**

- **Classe I**. Produto Fabricado sob os padrões da Norma **ISO 13485:2003+AC2007**.

A Máscara atende às exigências da Norma **EN 14683:2019+AC2019**

Ensaio N°: GOLMOXKC355595L1

Laboratório Acreditado pelo CNAS N°: L0412

Eficiência de Filtração Bacteriana	Respirabilidade/Pressão Diferencial	Limpeza Microbiana/Carga Biológica	Pressão de Resistência a Respingos
>= 98%	< 60%	<= 30 UF/g	>=16

Instruções de Uso:

Verifique o estado da máscara e a validade antes de usar.

Não use a máscara por mais de 4 horas

Lave as mãos antes de usar a máscara e toque apenas nos elásticos

Coloque a máscara sobre nariz/boca e amarre as tiras atrás da cabeça.

Ajuste adequadamente a tira nasal e a área do queixo.

Evite tocar ou manipular a máscara durante o uso.

Informação Logística:

Etiquetagem de Acordo com a Norma 14683:2019+AC:2019 e Produto de Saúde Classe I.

Apresentação:

- Caixa Dispensadora com 50 unidades
- Embalagem Master com 2.000 unidades (40 dispensadores)
- Euro Paletes com 25 Caixas

Cod EAN: 9 6974100420270 - Feito na China

UDI-DI Básico: 6974100420270AT4

Armazenar em local seco, limpo e com temperaturas entre 5° e 35°. Não expor diretamente à luz solar