



Fiche Produit

Réf. IC-12C-B

Masque Chirurgical Type IIR avec Liens



Informations Techniques :

Modèle Fabricant : LHKL-TB-1

Masque chirurgical Type IIR, composé de trois couches de tissu non tissé et de matériau filtrant. Doté d'une barrette nasale malléable en acier+PP et de quatre liens d'ajustement.

1ère COUCHE	2ème COUCHE	3ème COUCHE
Tissu Non Tissé 25g	Melt-Blown 25g	Tissu Non Tissé 20g

- Dimensions du Masque : 17,5 x 9,5 cm
- Barrette Nasale : 11 cm
- Liens d'Ajustement : 41 cm
- Couleur : Bleu
- Sans latex, graphène ni fibre de verre, ce qui réduit les risques d'irritations.

Règlements et Utilisation :

- Conforme au Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe I
- Fabriqué sous les standards de la norme ISO 13485:2003+AC2007
- Conforme à la norme EN 14683:2019+AC2019
- Essai N° : GOLMOXKC355595L1
- Laboratoire : Accrédité par CNAS N° L0412

Efficacité de Filtration Bactérienne	Respirabilité/Pression Différentielle	Propreté Microbienne/Charge Biologique	Pression de Résistance aux Éclaboussures
>= 98%	< 60%	<= 30 UF/g	>=16

Instructions d'Utilisation :

1. Vérifiez l'état du masque et sa date de péremption avant utilisation.
2. Ne pas utiliser le masque pendant plus de 4 heures.
3. Lavez-vous les mains avant de manipuler le masque et touchez uniquement les liens.
4. Placez le masque sur le nez et la bouche, puis attachez les liens derrière la nuque.
5. Ajustez correctement la barrette nasale et la zone du menton.
6. Évitez de toucher ou manipuler le masque pendant son utilisation.

Informations Logistiques :

Étiquetage Conforme à la Norme 14683:2019+AC:2019 et Produit Médical Classe I.

Présentation :

- Conditionnement : Boîte distributrice de 50 unités
- Carton Principal : 2 000 unités (40 distributeurs)
- Palettes Europe : 25 cartons

Code EAN : 9 6974100420270 - Fabriqué en Chine

UDI-DI Basique : 6974100420270AT4

Stocker dans un endroit sec et propre, à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil.