



Fiche Technique

Réf. IC-38-FFP2

Masque de Protection FFP2 NR



ICEMEDICS®

CE 2834

Informations Techniques :

Modèle Fabricant : 0117 FFP2 NR

Masque de protection personnelle fabriqué avec quatre couches de tissu non tissé et de tissu filtrant. Équipé d'une barrette nasale ajustable en acier + PP et de deux élastiques doux pour un ajustement confortable (protège-oreilles inclus avec chaque unité).

1ère Couche	2ème Couche	3ème Couche	4ème Couche
Tissu Non Tissé 50g	Spunlace 50g	Melt-Blown 50g	Tissu Non Tissé 50g

- Clip nasal : 8,5 cm
- Élastiques : 17,5 cm
- Couleur : Blanc
- Masque et élastiques sans latex, graphène ni fibre de verre, minimisant les risques d'irritations.

Normes et Utilisation :

- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) Cat. III
- Fabriqué selon les normes ISO 13485:2003+AC2007
- Répond aux exigences de la norme EN 149:2001+A1:2009
- Rapport de Test : WLH0201-2021

Classification	Catégorie EPI	Certificat CE N° :
FFP2 NR	Cat. III	CE-PC-200320-067-01-9E

Instructions d'Utilisation :

1. Vérifiez l'état du masque et sa date de péremption avant utilisation.
2. Lavez-vous les mains avant de manipuler le masque et touchez uniquement les élastiques.
3. Placez le masque sur le nez et la bouche, passez les élastiques derrière les oreilles.
4. Ajustez correctement la barrette nasale et la zone du menton.
5. Évitez de toucher ou de manipuler le masque pendant son utilisation.
6. Ne pas utiliser le masque plus de 8 heures.

Informations Logistiques :

Étiquetage Conforme à la Norme 149:2001+A1:2009 - EPI Cat III.

Présentation :

- Conditionnement : Sachet individuel hygiénique
- Boîte Distributrice : 50 unités
- Carton Master : 600 unités (12 distributeurs)
- Palettes Europe : 25 cartons

Code EAN : 96974100420013 - Fabriqué en Chine

Stocker dans un endroit sec, propre, à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.